



ERGONOM
ZOOM™

Stworzona
do intensywnej pracy,
zaprojektowana z
myślą o Twoim
kręgosłupie.



ORASCOPTIC

Profil klienta:

- Dentyści, studenci stomatologii, chirurdzy
- Lekarze używający lup Ergo w powiększeniu mniejszym niż 5.0x
- Lekarze doświadczający bólu szyi lub pleców
- Nowi użytkownicy lup, dla których ergonomia ma priorytetowe znaczenie

Stworzone do intensywnej pracy, zaprojektowane z myślą o kręgosłupie.

Długie godziny spędzane podczas pracy mają negatywny wpływ na postawę ciała, stan Twojego kręgosłupa i karierę zawodową. Lupa ErgoZoom została stworzona, aby zniwelować to obciążenie.

Zoptymalizowany kąt nachylenia tubusów dostosowany do postawy ciała i regulowane powiększenie zapewniają komfortową i ergonomiczną pracę zarówno dziś, jak i przez następne dwadzieścia lat.



ZMIENNE POWIĘKSZENIE W LUPIE ERGO

- Powiększaj i zmniejszaj, aby zmienić perspektywę.
- Wybierz takie parametry rozmiaru i precyzji pola widzenia, które są najbardziej odpowiednie dla każdej wykonywanej procedury.

Powiększenie:	3.5x	5.5x
Szerokość pola widzenia:	3.60" (9.2 cm)	2.71" (6.9 cm)
Głębina pola widzenia:	3.58" (9.1 cm)	2.51" (6.4 cm)
Waga teleskopu:	21.3g (dla porównania, HDL 3.5x to 23.2g)	
Zakres odległości roboczej:	15" (38.1 cm) do 27" (68.6 cm)	
Kąty deklinacji:	10°, 15° lub 20°	
Konstrukcja ramki:	Aluminium i plastik	
Kompatybilne z ramką:	Dragonfly PRO Phantom RydonX	Tempo Tempo Refined Fit Triumph

Aby zmienić powiększenie:

1. Chwyć czarny rowkowany pierścień teleskopu tubusa i przekręć
2. Dostosuj preferowaną moc powiększenia zgodnie z oznaczeniami na tubusie
3. Upewnij się, że oba teleskopy są ustawione na tę samą moc

Uwaga: Wraz ze wzrostem powiększenia zmniejsza się soczewka wejściowa. Konwergencja lasera jest zawsze ustawiona dla powiększenia 5.5x.



Chwyć tutaj i obróć

Wyrównaj powiększenie



5.5x 3.5x



Odległość robocza pozostanie stała podczas powiększania i pomniejszania, ale pole widzenia będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem powiększenia.



- Jeśli masz ostrość przy powiększeniu 5.5x, utrzymasz ją również przy powiększeniu 3.5x
- Jeśli ustawiłeś ostrość przy 3.5x, być może będzie trzeba ją skorygować zmieniając na 5.5x

Jak wybrać odpowiednią deklinację dla swoich klientów:




Wraz ze zwiększeniem kąta nachylenia tubusów widoczny przez nie obraz będzie się znajdował coraz bliżej korpusu lekarza.

Największą popularnością cieszy się kąt 15 stopni, natomiast kąt 20 stopni jest odpowiedni dla lekarzy, których pacjenci znajdują się najbliżej ich tułowia.

Konkurencja Ergo

Orasoptic	LumaDent	Admetec	Surgitel	Bryant Dental	DVI	Q-Optics	Univet	Exam Vision
3.0x	3.0x	3.0x	3.5x	2.9x	3.0x	3.0x	3.5x	4.0x
3.5x	3.5x	4.0x	4.5x	3.8x	3.5x	3.5x	4.5x	
5.0x	4.0x	5.0x	5.5x	5.7x	4.5x	4.5x	5.7x	
3.5x / 5.5x	4.5x	6.0x	6.5x	7.8x				
?	5.0x	7.5x	8.5x					
?	6.0x	10.0x	10.5x					
	7.0x	3.8x / 5.3x / 7.0x						
	8.0x	5.6x / 7.4x / 10.0x						
	10.0x	Admetec jest jedyną marką oferującą lupy Ergo o zmiennym powiększeniu.						

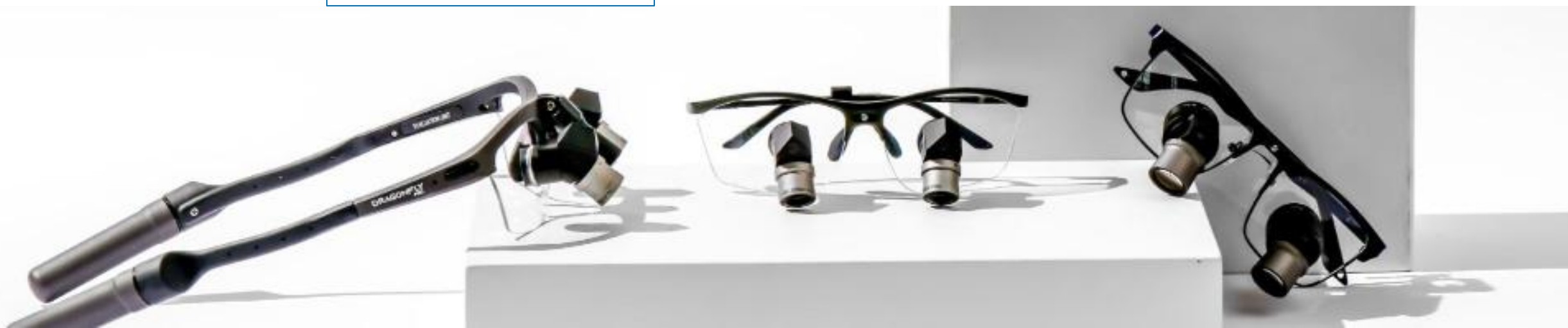

Opinie testerów lupy Ergo...

Procedury wykonywane przy 3.5x:

- Przygotowanie do odbudowy
- Ogólne badania
- Higienizacja
- Redukcja zgryzu
- Wypełnianie ubytków
- Ekstrakcja
- Korony i mosty
- Chirurgia jamy ustnej

*“Doskonała przejrzystość. **Bardzo jasny obraz.**
świetnie wykonane!”*

*“**Niezwykłe wygodne!**”*

*“Wyjątkowa **jakość i wszechstronność.**”*

Procedury wykonywane przy 5.5x:

- Endodoncja
- Uzupełnienia krawędzi
- Usuwanie cementu
- Polerowanie żywic
- Sprawdzenie próchnicy
- Wszelkie prace poddziąstłowe
- Laser
- Usuwanie głębokich wypełnień
- Usuwanie wierzchołków korzeni
- Zabiegi implantologiczne

*“ErgoZoom jest dla mnie **idealna.**”*

*“**Świetny** produkt! Proszę o informację,
kiedy pojawi się na rynku.”*

*“Lupy Ergo uratowały mój kręgosłup.
Jestem bardo wdzięczny!”*



Lupa Ergo ze zmiennym powiększeniem już w sprzedaży!

**Stworzona do intensywnej
pracy, zaprojektowana z myślą
o Twoim kręgosłupie.**

www.opticalid.pl

