



ERGONOM
ZOOM™

Stworzona
do intensywnej pracy,
zaprojektowana z
myślą o Twoim
kręgosłupie



ORASCOPTIC



Kto pracuje w lupie ErgoZoom

- Dentyści, studenci stomatologii, chirurdzy
- Lekarze doświadczający bólu szyi lub pleców
- Nowi użytkownicy lup, dla których ergonomia ma priorytetowe znaczenie
- Lekarze pracujący w lupach tradycyjnych

Stworzone do intensywnej pracy, zaprojektowane z myślą o Twoim kręgosłupie.

Długie godziny spędzane podczas pracy mają negatywny wpływ na postawę ciała, stan Twojego kręgosłupa i karierę zawodową. Lupa ErgoZoom została stworzona, aby zniwelować to obciążenie.


Zoptymalizowany kąt nachylenia tubusów dostosowany do postawy ciała i regulowane powiększenie zapewniają komfortową i ergonomiczną pracę zarówno dziś, jak i przez następne dwadzieścia lat.

ZMIEN PERSPEKTYWĘ

- Wybierz takie parametry rozmiaru i precyzji pola widzenia, które są najbardziej odpowiednie dla każdej wykonywanej procedury.



Powiększenie:	3.5x	5.5x
Szerokość pola widzenia:	9.2 cm	6.9 cm
Głębina pola widzenia:	9.1 cm	6.4 cm
Zakres odl. roboczej:	38.1 cm do 68.6 cm	
Kąty deklinacji:	10°, 15° lub 20°	
Konstrukcja ramki:	Aluminium i plastik	
Kompatybilne z ramką:	Dragonfly PRO Phantom	Tempo Triumph

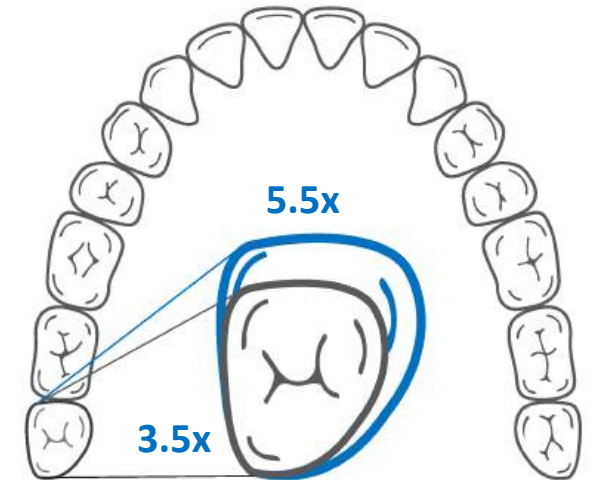

Aby zmienić powiększenie:

1. Chwyć czarny prążkowany pierścień teleskopu tubusa i przekręć
2. Dostosuj preferowaną moc powiększenia zgodnie z oznaczeniami na tubusie
3. Upewnij się, że oba teleskopy są ustawione na tę samą moc Uwaga: Wraz ze wzrostem powiększenia zmniejsza się soczewka wejściowa. Konwergencja lasera jest zawsze ustawiona dla powiększenia 5.5x.



Chwyć tutaj i obróć

Wyrównaj powiększenie



5.5x 3.5x

Odległość robocza pozostanie stała podczas powiększania i pomniejszania, ale pole widzenia będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem powiększenia.



- Jeśli masz ostrość przy powiększeniu 5.5x, utrzymasz ją również przy powiększeniu 3.5x
- Jeśli widzisz ostro przy 3.5x, być może przy 5.5x będzie potrzebna drobna modyfikacja odległości

Personalizowany kąt wklejenia tubusów - dlaczego to jest ważne? grafika



Wraz ze zwiększeniem kąta nachylenia tubusów widoczny przez nie obraz będzie przemieszczał się w stronę lekarza.

Największą popularnością cieszy się kąt 15 stopni, natomiast kąt 20 stopni jest odpowiedni dla lekarzy, którzy pracują blisko przysunięci do swoich pacjentów.

Opinie testerów lupy Ergo...

Procedury wykonywane przy 3.5x:

- Przygotowanie do odbudowy
- Ogólne badania
- Ortodoncja
- Higienizacja
- Redukcja zgryzu
- Wypełnianie ubytków
- Ekstrakcja
- Korony i mosty
- Chirurgia jamy ustnej

*“Doskonała przejrzystość. **Bardzo jasny obraz.**
świetnie wykonane!”*

*“**Niezwykłe wygodne!**”*

*“Wyjątkowa **jakość i wszechstronność.**”*

Procedury wykonywane przy 5.5x:

- Endodoncja
- Uzupełnienia krawędzi
- Usuwanie cementu
- Polerowanie żywic
- Sprawdzenie próchnicy
- Wszelkie prace poddziąstłowe
- Laser
- Usuwanie głębokich wypełnień
- Usuwanie wierzchołków korzeni
- Zabiegi implantologiczne

*“ErgoZoom jest dla mnie **idealna.**”*

*“**Świetny** produkt! Proszę o informację,
kiedy pojawi się na rynku.”*

*“Lupy Ergo uratowały mój kręgosłup.
Jestem bardo wdzięczny!”*





Lupa Ergo ze zmiennym powiększeniem już w sprzedaży!

**Stworzona do intensywnej
pracy, zaprojektowana z myślą
o Twoim kręgosłupie**



www.opticalid.pl

